

Informazioni per i pazienti



Muoversi meglio, Vivere meglio

RECUPERO DELLE CAPACITÀ MOTORIE PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA

La terapia [AMPS \(Automated Mechanical Peripheral Stimulation\)](#) erogata dal dispositivo medico GONDOLA® è efficace nel migliorare i sintomi motori causati da disturbi neurologici o da malattie neurodegenerative come [le Neuropatie Periferiche, la malattia di Parkinson e i Parkinsonismi](#).

Le Neuropatie Periferiche (sensitive e sensitivo-motorie) e la malattia di Parkinson sono due delle principali cause di disturbi del movimento, **inducono una progressiva perdita delle capacità motorie ed hanno un forte impatto sull'indipendenza del paziente.**

Comportano, inoltre, ridotta capacità di svolgere attività lavorative, e costi elevati e ricorrenti per cure, trattamenti e assistenza.

Il trattamento erogato dal dispositivo GONDOLA®, nei pazienti che hanno risposta positiva, aiuta a ottenere i seguenti benefici:

- aumento dell'equilibrio, maggiore sicurezza nel cammino,
- riduzione della lentezza nei movimenti (bradicinesia),
- nei pazienti Parkinsoniani, riduzione dei blocchi motori e del freezing della marcia.

GUARDA
LE TESTIMONIANZE
PARKINSON

GUARDA
LE TESTIMONIANZE
NEUROPATIA



UN EFFICACE AUSILIO TERAPEUTICO

GONDOLA® rappresenta un importante ausilio terapeutico sia nelle **Neuropatie Periferiche** (patologia per la quale non esistono trattamenti conosciuti), sia nella **malattia di Parkinson**.

Il trattamento AMPS erogato dal dispositivo medico **GONDOLA®** è, per questi pazienti, il **primo approccio terapeutico non invasivo, non farmacologico, efficace** per consentire di **migliorare l'equilibrio e la stabilità e velocità di cammino, a tutto vantaggio della qualità della vita.**

Consente, inoltre, di ridurre i rischi di caduta.

L'effetto del trattamento GONDOLA® è stato documentato in diversi [studi clinici e pubblicazioni scientifiche](#).

GONDOLA® risulta maggiormente efficace quando i sintomi motori sono più evidenti.

LEGGI GLI STUDI CLINICI



PIÙ EQUILIBRIO, MIGLIORE CAMMINO

GONDOLA® è un dispositivo portatile ad uso personale, progettato per permettere ai pazienti di ricevere la terapia AMPS direttamente a casa.

La AMPS si basa su stimolazioni a impulsi meccanici controllati applicate in specifiche zone di entrambi i piedi; tali stimolazioni consentono di aumentare la trasmissione di segnali dalle periferie al sistema nervoso centrale e di migliorare la gestione degli schemi motori regolati dal sistema nervoso centrale a livello midollare e cerebrale.

Il risultato è la riduzione dei disturbi motori e di equilibrio causati da Neuropatie Periferiche e malattia di Parkinson.



GONDOLA®

Muoversi meglio, Vivere meglio

COME VERIFICARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO GONDOLA®

Per verificare la propria risposta alla terapia AMPS è necessario prenotare una visita d' idoneità presso uno dei [Centri Specializzati GONDOLA®](#).


Durante tale visita, verificato il quadro clinico del paziente e i sintomi della malattia, viene effettuata una stimolazione AMPS con il dispositivo medico GONDOLA®.

In caso di risposta positiva, i benefici si riscontrano subito dopo la stimolazione e durano da due a cinque giorni dopo il trattamento, a seconda della malattia e della risposta del paziente.

I pazienti possono così verificare direttamente gli effetti della terapia e poi valutare se dotarsi di un dispositivo da utilizzare periodicamente a casa con l'aiuto di un familiare.

In caso di risposta positiva, il regolare uso del dispositivo consente di mantenere i benefici nel tempo.

PRENOTA UNA VISITA DI IDONEITÀ

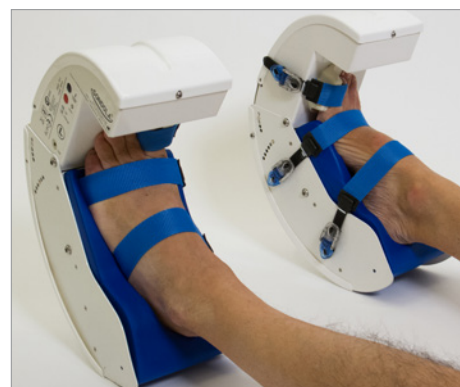

UN DISPOSITIVO PORTATILE, DA USARE A CASA

GONDOLA® è stato progettato e realizzato per poter essere utilizzato dal paziente a casa con l'assistenza di un familiare.

Durante la terapia il paziente rimane sdraiato sul letto, le unità del dispositivo vengono posizionate sui piedi dal familiare, dopo la terapia i dispositivi vengono riposti nella valigetta.

La terapia ha durata inferiore a 2 minuti e i benefici permangono fino a 5 giorni.

Il dispositivo inizialmente deve essere configurato in base alle caratteristiche ed alla risposta del paziente; la configurazione viene effettuata presso un Centro Specializzato GONDOLA®.

In seguito, l'intervento di un operatore specializzato è necessario per gli interventi di manutenzione periodica (taratura del dispositivo e sostituzione delle batterie).



QUALITÀ DELLA VITA

I problemi di equilibrio e di cammino derivanti da disturbi neurologici o da malattie neurodegenerative quali **Neuropatie Periferiche e Parkinson** portano a una **progressiva riduzione di indipendenza del paziente.**

La maggiore autonomia motoria e il ridotto rischio di cadute hanno un impatto positivo sull'indipendenza del paziente e sulla sua qualità di vita.

Gondola Medical Technologies SA invita a seguire sempre le terapie prescritte dal medico curante.





Muoversi meglio, Vivere meglio

GONDOLA® è un dispositivo medico CE 0476
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

GONDOLA® è un marchio registrato di proprietà di
Gondola Medical Technologies SA.
Tutti i diritti sono riservati

www.gondola-medical.com

Gondola Medical Technologies SA
Vicolo Nassetta 2
6900 Lugano
SVIZZERA

email info@gondola.org

tel. 0041 91 921.3838